

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP
		Edição: 01
Área: Laboratório de Anatomia Patológica (LAP)		Página: 1/3
Assunto: Biópsias de congelação		Vigência: 19/07/2019

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
5. DEFINIÇÕES
6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
7. FLUXOGRAMAS
8. ANEXOS
9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Edição	Alteração
01	Emissão inicial do documento em 19/07/2016

Elaborado por: Vera D. Aiello Diretora Revisado por: Márcio J F Chaves Biólogo	19/07/2016	Aprovado por: Vera D. Aiello Diretora	Inserir informações
---	------------	--	------------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP
		Edição: 01
Área: Laboratório de Anatomia Patológica (LAP)		Página: 2/3
Assunto: Biópsias de congelação		Vigência: 19/07/2019

1. OBJETIVO

1.1 Padronizar a rotina operacional para biópsias de congelação, desde a requisição do patologista pelo centro cirúrgico, até o diagnóstico final do exame.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Biópsias de urgência advindas do Centro cirúrgico do INCOR.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Responsável do Centro Cirúrgico, técnico auxiliar Médico Patologista, Secretaria do Laboratório de Anatomia Patológica

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

4.1 Laudo diagnóstico e prontuário eletrônico (Si3).

5. DEFINIÇÕES

5.1 Não se aplica

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

6.1 O Centro cirúrgico avisa a Secretaria do Laboratório de Anatomia Patológica que será ou está sendo colhida biópsia durante ato cirúrgico e solicita presença do Patologista.

6.2 Secretaria do Laboratório de Anatomia Patológica, avisa o médico Patologista plantonista sobre a biópsia de Congelação e informa o número da sala cirúrgica e o nome do paciente.

6.3 O Médico Patologista, Desloca-se ao Centro Cirúrgico e obtém pessoalmente informações da equipe cirúrgica sobre o objetivo do exame de congelação. Procede ao exame macroscópico do material, selecionando áreas para cortes de congelação.

6.4 Procede ao corte do tecido em micrótomo de congelação e cora as lâminas e, se necessitar de auxílio, solicita a presença de um técnico de histopatologia para cortar e corar o material. As lâminas devem ser devidamente identificadas com o nome do paciente.

6.5 O patologista faz a leitura das lâminas e informa o diagnóstico ao cirurgião.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP
		Edição: 01
Área: Laboratório de Anatomia Patológica (LAP)		Página: 3/3
Assunto: Biópsias de congelação		Vigência: 19/07/2019

6.6 Médico Patologista ou técnico auxiliar, rotula os fragmentos congelados e não congelados, acondicionando-os em frascos com fixador (formalina tamponada a 10%).

Leva os frascos de biópsia devidamente rotulados de volta à sala cirúrgica, entregando-os ao enfermeiro circulante que dará o encaminhamento habitual ao material, para protocolo e entrega no Laboratório de Anatomia Patológica.

6.7 Médico Patologista, emite o laudo diagnóstico e o assina no prontuário eletrônico (Si3).

7. FLUXOGRAMAS

7.1 Não se aplica

8. ANEXOS

8.1 Não se aplica.

9. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

9.1 Não se aplica.