

Procedimento de Manutenção Preventiva

Eletrocardiógrafo Marquette, mod. MAC VU, FZ 13323 Série n. FZLR0645F.
Número: 005

Revisão: 1.0

Ass:

Bibliografia:

- (1) Manual de serviço- Eletrocardiógrafo MAC VU.
(2) **Frequência:** 06 meses

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas	Jensen	
Multímetro	3½ dígitos	
Alcool Isopropílico	HC	
Aspirador de pó	Electrolux	
Simulador de ECG	Dynatech	

Passos:

- Inspeção visual. _____
- Limpeza interna (Cabeça térmica, Sensores e ventoinhas) _____
- Limpeza externa (Teclado, cabos e monitor) _____
- Teste de funcionamento. _____

OBS: