

Procedimento de Manutenção Preventiva

Oxímetro modelo DX 2405

Número: 11

Revisão: 1.0

Ass:

Bibliografia:

(1) Manual de serviço- Oxímetro

Observações e recomendações:

Para entrar no modo Test – Ligar máquina com a 1ª tecla pressionada.
Quando se ouvir o som, pressionar a 3ª tecla.

Frequência: 6 meses

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas		
Multímetro	3½ dígitos	
Simulador de sensor	Modelo TB 500B	

Passos:

- Inspeção visual;
- Limpeza interna e externa;
- Checar bateria;
- Testes de funcionamento : (1) capítulo 12 página 43
- Testes de performance do monitor: (1) capítulo 13 página 47
- Checar calibração: (1) capítulo 14, página 51