

**Procedimento de Manutenção Preventiva**

Oxímetro modelo DX 2515

Número: 14

Revisão: 1.0

Ass:

**Bibliografia:**

(1) Manual de serviço- Oxímetro

**Frequência:** 4 meses

**Material necessário**

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas		
Multímetro	3½ dígitos	
Simulador de sensor	Modelo TB 500B	

**Passos:**

- Inspeção visual;
- Limpeza interna e externa;
- Checar bateria;
- Testes de funcionamento : capítulo 08- página 33
- Testes eletrônicos: capítulo 09 – página 37
- Teste de performance do monitor: capítulo 09.2 – página 40