

PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**Monitores Cardíacos, Marca SIEMENS, Mods. SC 7000 e SC 6002XL. Número : 027**Revisão : *1.0*

Ass.: _____

BIBLIOGRAFIA:**Manual de Serviço cedido pela SIEMENS do curso efetuado no fabricante nos EUA, dos Monitores Mod.s SC 7000 e SC 6002.****Frequência: 12 meses****MATERIAL NECESSÁRIO**

Nome	Característica	Fonte
Simulador de ECG.	Dynatech/Nevada	
Simulador de Saturação de O2.	Dynatech/Nevada	
Ferramentas usuais		
Aspirador de Pó		
Manual de Serviço	SC 7000 e SC 6002	

Passos:**A – Monitor SC 7000.**

- 1- Verificação da Fonte de Alimentação.**
- 2- Teste de todos os Alarmes.**
- 3- Verificação de todos os parâmetros.**
- 4- Verificação dos Erros Logs.**
- 5- Verificar a comunicação entre os monitores.**
- 6- Limpeza interna e externa.**
- 7- Verificação da tensão da bateria.**
- 8- Verificação da integridade dos cabos e acessórios.**

B – Idem para os monitores SC 6002XL.

C:\zips\InCor ONA\documentos das areas\Engenharia Clínica\Procedimentos de preventiva\027 procedimento de preventiva dos Monitores SC 7000 e SC 6002 da Siemens..doc03/05/2015