

PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Multiview Workstation , Marca SIEMENS, Mods. 3000. Número : 028

Revisão : **1.0**

Ass.: _____

BIBLIOGRAFIA:

Manual de Serviço cedido pela SIEMENS do curso efetuado no fabricante nos EUA, da Central de Monitorização MVWS, mod. 3000.

Frequência: 12 meses

MATERIAL NECESSÁRIO

Nome	Característica	Fonte
Simulador de ECG.	Dynatech/Nevada	
Ferramentas usuais		
Aspirador de Pó		
Manual de Serviço	MVWS mod. 3000	

Passos:

A – Central de Monitorização, Mod. 3000.

- 1- Inspeção visual externa.**
- 2- Teste de todos os Alarmes.**
- 3- Verificação de todos os parâmetros.**
- 4- Verificação dos Erros Logs.**
- 5- Verificar a comunicação entre os monitores.**
- 6- Limpeza interna e externa.**
- 7- Verificação das impressoras e registradores.**
- 8- Verificação da integridade dos cabos e acessórios.**