

PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Unidades de hipo/hipertermia
0031

Número:

Revisão 1.0

Ass: _____

BIBLIOGRAFIA

(1) Manual de serviço Gaymar P/N 08207-000

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Ler páginas 3-1 à 3-16 do manual de serviço.

FREQÜÊNCIA

- Anual

MATERIAL NECESSÁRIO

Descrição	Características	Fonte
Testador de fluxo e temperatura	Gaymar TPT-9	(1) pg 3-11
Termômetro de mercúrio	Gaymar TFC-1 Faixa de -2°C to 52°C, precisão $\pm 1^\circ\text{C}$	(1) pg 3-1 até 3-16
Mangueira de conexão à manta	Gaymar DBK-9	(1) pg 3-13
Manta de hipo/hipertermia	Gaymar DHP-901 or DHP-813	(1) pg 3-1 até 3-16
Multímetro digital	3½ dígitos.	(1) pg 3-14

PASSOS

- Verificar condições do chassis.
- Verificar o Circuito Breaker.
- Verificar condições de luzes e alarmes.
- Verificar o fluxo de água.
- Verificar a atuação das chaves.
- Testar a placa controladora do reservatório de água fria.
- Testar a placa controladora de temperatura da manta e teste do display.
- Testar o funcionamento do modo automático.
- Testar os termostatos.
- Testar resistência de terra e corrente de fuga com multímetro.