

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

CATEGORIA: Equipamentos / Aparelhos

EXECUTOR: Fisioterapeuta

SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®

Instalação do sistema de nebulização para que seja realizada inalação durante a vigência da ventilação mecânica.

OBJETIVO

Realizar aerosolterapia durante a ventilação mecânica.

MATERIAIS

- Nebulizador do Servo®
- Copo de nebulização
- Extensão
- Filtro
- Cabo de conexão
- Água destilada
- Agulha
- Seringa
- Medicamento a ser inalado

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO / MATERIAL

- Nebulizador específico para ventilador mecânico Servo®

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

AÇÕES TÉCNICAS

- Solicitar ao PROAR os materiais que serão utilizados: nebulizador do Servo®, copo de nebulização, extensão, filtro e cabo de conexão;



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do InCor


- Colocar água destilada no interior do nebulizador entre a marcação dos níveis mínimo e máximo;



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do InCor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

- Colocar o copo no interior do nebulizador de modo que, a extremidade inferior do copo entre em contato com a água destilada;

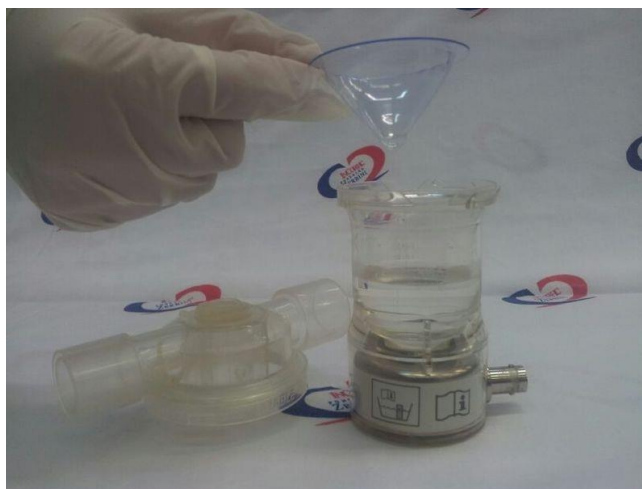

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do InCor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

- Fechar o nebulizador;



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do InCor

- Com auxílio de uma seringa inserir a medicação que será utilizada durante a nebulização por meio de uma agulha na película localizada na parte superior do nebulizador;



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do InCor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

- Conectar a traqueia de PVC ao inalador e acoplar o cabo de conexão;



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- Acoplar a outra extremidade do cabo no ventilador mecânico e o filtro na saída do ramo expiratório;



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

- Conectar a traqueia de PVC no conector “Y” acoplado à cânula do paciente e a outra extremidade do nebulizador no ramo inspiratório do circuito;



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor


- Selecionar o ícone **NEBULIZADOR** na tela do ventilador mecânico, localizado na parte superior da mesma;

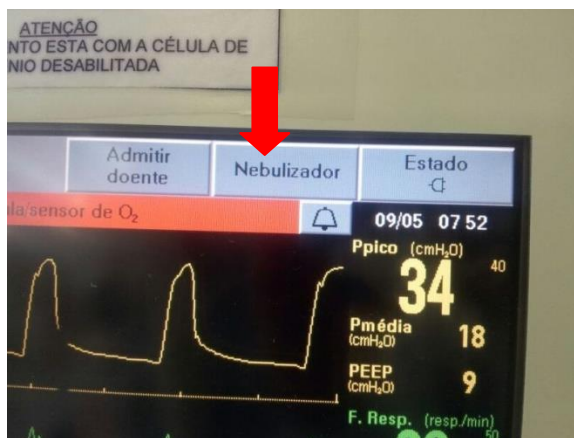

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

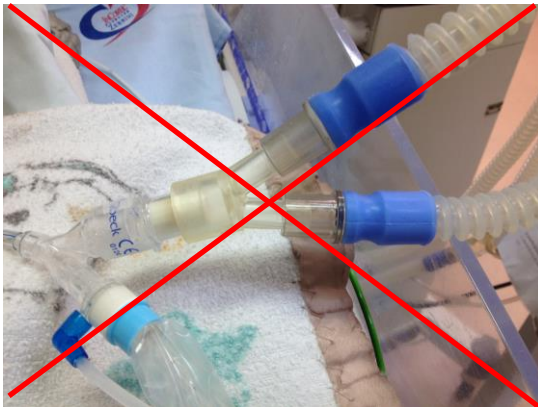PONTOS DE ATENÇÃO	• A agulha que será utilizada para inserir a medicação no nebulizador deverá possuir a menor espessura possível. • Observar o formato do conector “Y”, o mesmo deverá ser em paralelo (Figura 1), pois o mesmo não acopla nos demais modelos.
	 Figura 1: Conector em paralelo  Figura 2: Conector em diagonal * Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do InCor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO: VENTILADOR MECÂNICO SERVO-I®		POP N°: 21
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

RESULTADOS ESPERADOS Realizar nebulização de forma adequada durante a vigência da ventilação mecânica.
--

BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS Manual Maquet ventilador mecânico Servo I®.

CONTROLE DE APROVAÇÃO E RESUMO DA REVISÃO ATUAL
--

ELABORAÇÃO	ANÁLISE CRÍTICA	APROVAÇÃO
Nome: Aline Ricci	Nome: Dra. Emilia Nozawa	Nome: Dra. Maria Ignêz Zanetti Feltrim
Genai Latorre		
Data: 28/05/2013	Data:	Data:

RESUMO DA REVISÃO	
1º revisão:	Nome:
2º revisão:	Nome:
3º revisão:	Nome: