

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 1/4
Assunto: Conferência dos Exames de TC no PACS		Vigência: 01/03/2023

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Edição	Alteração
00	Emissão inicial do documento em //.

Elaborado por: Jacqueline K.Nishimura Matsumoto Biomédica Revisado por: Dr. Luis Raphael P.D. Scoppetta Médico Assistente da CTDI	01/03/2021	Aprovado por: Dr. Cesar Higa Nomura Diretor do Serviço de Radiologia	01/03/2021
--	------------	---	------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 2/4
Assunto: Conferência dos Exames de TC no PACS		Vigência: 01/03/2023

1. OBJETIVO

- 1.1 Padronizar o modo de conferencia dos exames no PACS dos exames de Tomografia Computadorizada.


2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Salas de exames do Serviço de Tomografia Computadorizada do InCor.

3. RESPONSABILIDADES


- 3.1 Biomédicos e Tecnólogos em Imagem capacitados / habilitados.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

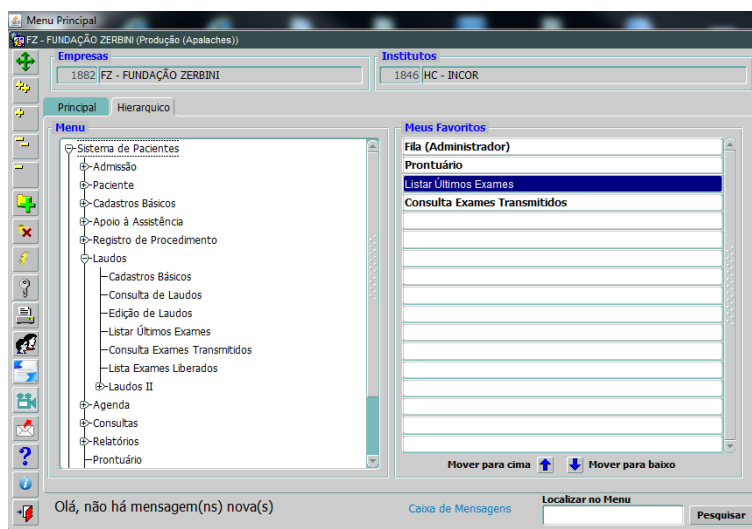


- 4.1 Acessar o S3, clicar em Sistema de Pacientes, Laudos, Listar Últimos Exames.


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Edição: 01
Assunto: Conferência dos Exames de TC no PACS		Página: 3/4 Vigência: 01/03/2023

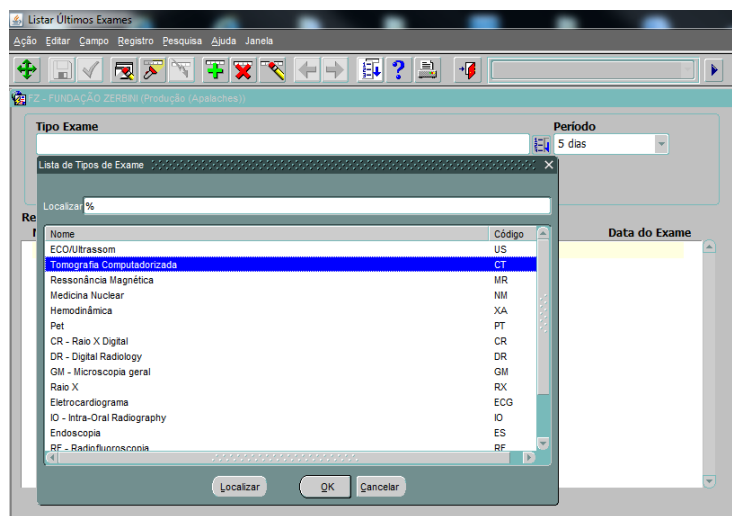

4.2 No tipo de Exame, selecionar Tomografia Computadorizada.

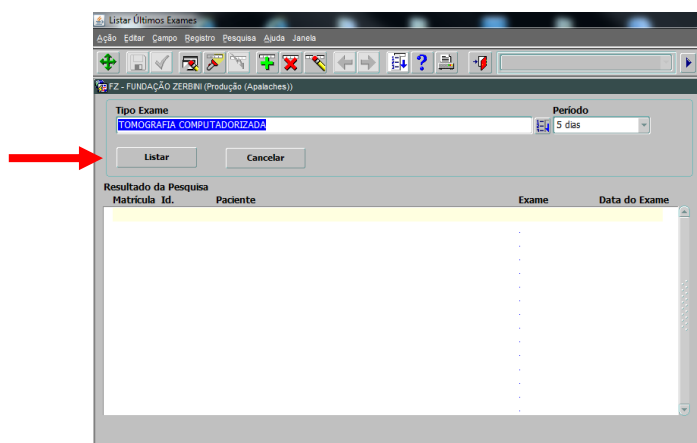


4.2 Clicar em Listar.

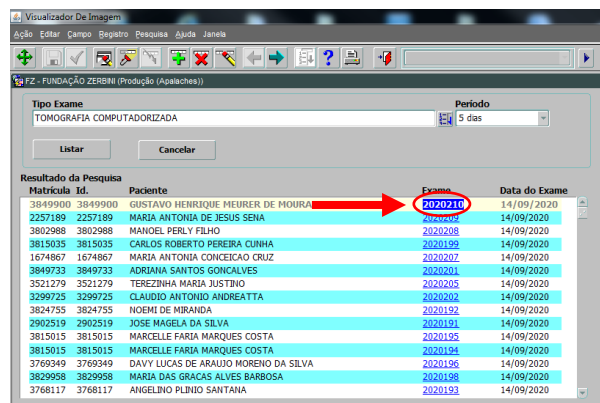

4.3 Dar duplo clique no número do exame para carregar as imagens;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 4/4
Assunto: Conferência dos Exames de TC no PACS		Vigência: 01/03/2023

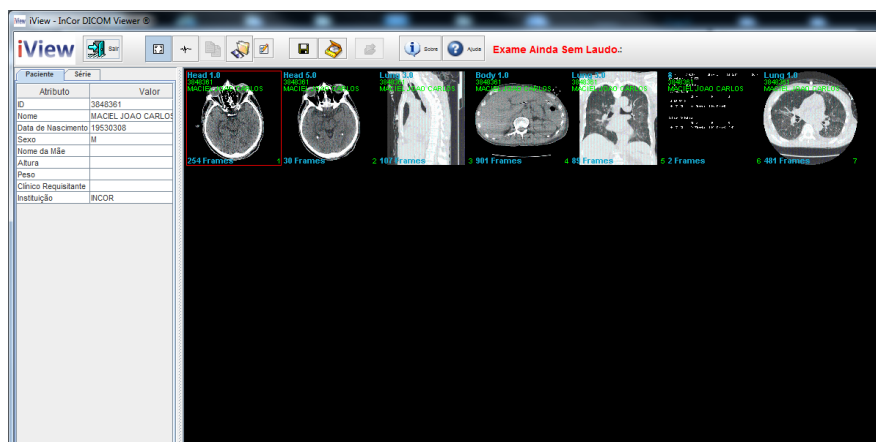

4.4 Dar duplo clique sobre as imagens para carregar o conteúdo completo de cada reconstrução.