

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 1/4
Assunto: Registro de Paciente Tomografia Computadorizada		Vigência: 01/03/2023

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DEFINIÇÕES
5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Edição	Alteração
00	Emissão inicial do documento em //.

Elaborado por: Jacqueline K.Nishimura Matsumoto Biomédica Revisado por: Dr. Luis Raphael P.D. Scoppetta Médico Assistente da CTDI	01/03/2021	Aprovado por: Dr. Cesar Higa Nomura Diretor do Serviço de Radiologia	01/03/2021
--	------------	---	------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 2/4
Assunto: Registro de Paciente Tomografia Computadorizada		Vigência: 01/03/2023

1. OBJETIVO

- 1.1 Padronizar o registro de pacientes nos aparelhos de Tomografia Computadorizada utilizando o *worklist* do sistema PACS.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Salas de exames do Serviço de Tomografia Computadorizada do InCor.

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Biomédicos e Tecnólogos em Imagem capacitados / habilitados.

4. DEFINIÇÕES

- 4.1 *Worklist* – lista de Trabalho
- 4.2 PACS - (Picture Archiving and Communication System) - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens.


5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 5.1 Clicar em SCAN e depois clicar em APPOINT;



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Edição: 01
Assunto: Registro de Paciente Tomografia Computadorizada		Página: 3/4
		Vigência: 01/03/2023

5.2 Clicar em FROM SERVER:

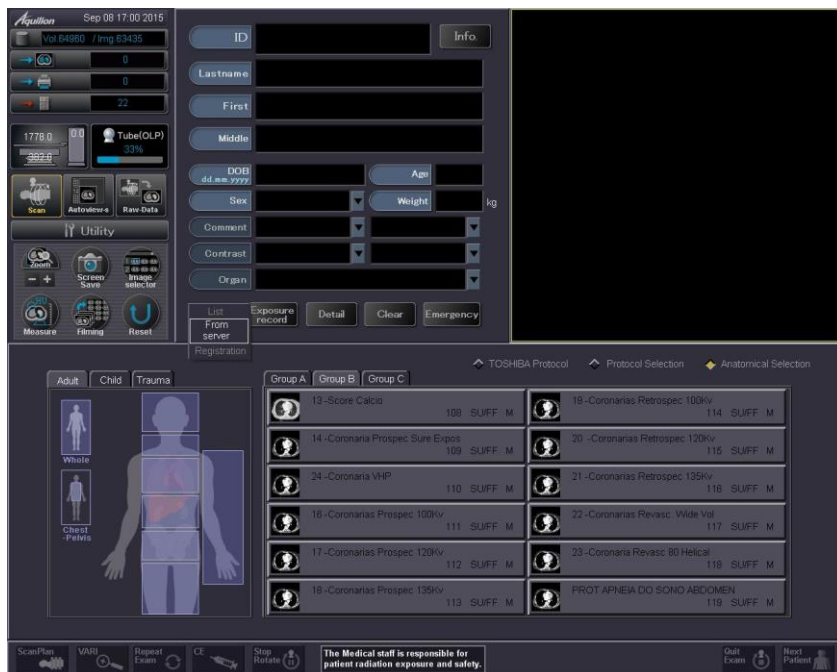

5.3 Em LIST SEARCH colocar o Identificador do paciente, clicar em SELECT, conferir os dados da seleção do paciente e depois clicar em OK;



Patient ID	Patient Birth Date	Patient Sex	Accession Number	Ref. Physician Name	Req. Proc. Description
3188382	1944 10 29	M	CT1514306		ANGIOTOMOGRAFIA C
2917789	1928 07 08	M	CT1514344		TOMOGRAFIA COMPU
2917799	1929 07 08	M	CT1514346		TOMOGRAFIA COMPU
3497925	1948 10 08	M	CT1514371		TOMOGRAFIA COMPU
3611806	1954 01 24	M	CT1514325		TOMOGRAFIA COMPU
3611806	1954 01 24	M	CT1514326		TOMOGRAFIA COMPU
3611806	1954 01 24	M	CT1514327		TOMOGRAFIA COMPU
3628417	1930 09 17	F	CT1514366		TOMOGRAFIA COMPU
3628417	1930 09 17	F	CT1514364		TOMOGRAFIA COMPU
3628421	1954 02 24	F	CT1514331		ANGIOTOMOGRAFIA C
3495106	1943 05 15	M	CT1514335		TOMOGRAFIA COMPU
3421772	1959 04 14	F	CT1514373		ANGIOTOMOGRAFIA C
3421772	1959 04 14	F	CT1514374		ANGIOTOMOGRAFIA C
3421772	1959 04 14	F	CT1514375		ANGIOTOMOGRAFIA C
2914138	1934 08 08	M	CT1514296		TOMOGRAFIA COMPU
2914138	1934 08 08	M	CT1514297		TOMOGRAFIA COMPU

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 4/4
Assunto: Registro de Paciente Tomografia Computadorizada		Vigência: 01/03/2023

5.4 Conferir os dados do paciente: ID, NOME, IDADE, SEXO;



The screenshot shows the Aquilion CT scanner control panel. The top section displays patient information fields: ID (999999-002), Lastname (XXXXXX-002), First, Middle, DOB (dd.mm.yyyy), Age, Sex, Weight (kg), Comment, Contrast, and Origin. Below these are buttons for 'Appoint', 'Exposure record', 'Detail', 'Clear', and 'Emergency'. The bottom section shows a 'Protocol Selection' menu with various scan protocols listed, including '13-Score Calcia', '14-Coronaria Prospe Spec Sure Expos', '15-Coronaria VHP', '16-Coronaria Prospe Spec 100Kv', '17-Coronaria Prospe Spec 120Kv', '18-Coronaria Prospe Spec 135Kv', '19-Coronaria Retrospec 100Kv', '20-Coronaria Retrospec 120Kv', '21-Coronaria Retrospec 135Kv', '22-Coronaria Revasc. Wide Vol', '23-Coronaria Revasc 80 Helical', and 'PROT APNEJA DO SONO ABDOMEN'. A 'TOSHIBA Protocol' button is also visible.

5.5 Iniciar o exame.