

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 1/3
Assunto: Warm up e Calibração – TC 64 e 160		Vigência: 01/03/2023

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Edição	Alteração
00	Emissão inicial do documento em //.

Elaborado por: Jacqueline K.Nishimura Matsumoto Biomédica Revisado por: Dr. Luis Raphael P.D. Scoppetta Médico Assistente da CTDI	01/03/2021	Aprovado por: Dr. Cesar Higa Nomura Diretor do Serviço de Radiologia	01/03/2021
--	------------	---	------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 2/3
Assunto: Warm up e Calibração – TC 64 e 160		Vigência: 01/03/2023

1. OBJETIVO

- 1.1 Padronizar o modo calibração e aquecimento dos aparelhos de Tomografia Computadorizada.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Salas de exames do Serviço de Tomografia Computadorizada do InCor.

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Biomédicos e Tecnólogos em Imagem capacitados / habilitados.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 4.1 Antes de iniciar o procedimento “Warm up” – calibração, verificar se a mesa de exames esta fora do “gantry” e a porta de acesso da sala de exames esta fechada;
- 4.2 Clicar em UTILITY, MAINTENANCE e WARM UP.
- 4.3 O botão START será liberado para aquecimento e calibração.



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 3/3
Assunto: Warm up e Calibração – TC 64 e 160		Vigência: 01/03/2023