

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 1/2
Assunto: Warm up e Calibração - TC 320		Vigência: 08/09/2017

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Edição	Alteração
00	Emissão inicial do documento em xx/xx/2015.

Elaborado por: Jacqueline K.Nishimura Matsumoto Biomédica Revisado por: Dr. Luis Raphael P.D. Scoppetta Médico Assistente da CTDI	08/09/2015	Aprovado por: Dr. Cesar Higa Nomura Diretor do Serviço de Radiologia	08/09/2015
--	------------	---	------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 2/2
Assunto: Warm up e Calibração - TC 320		Vigência: 08/09/2017

1. OBJETIVO

- 1.1 Preservar a vida útil do equipamento de Tomografia Computadorizada e garantir o seu funcionamento adequado.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Tomógrafo de 320 canais do Serviço de Tomografia Computadorizada do InCor.

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Biomédicos e Tecnólogos em Imagem capacitados / habilitados.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 4.1 Antes de iniciar o procedimento “Warm up” – calibração, verificar se a mesa de exames está fora do “gantry” e a porta de acesso da sala de exames está fechada;
- 4.2 Clicar em UTILITY, TOOL e WARM UP;
- 4.3 O botão START será liberado para para aquecimento e calibração.